


Der Fixopore F Verband hat ein sehr einfaches und intuitives Anlegen. Die bedruckten Papiere mit Ziffern informieren über die Reihenfolge der Anwendung.

1

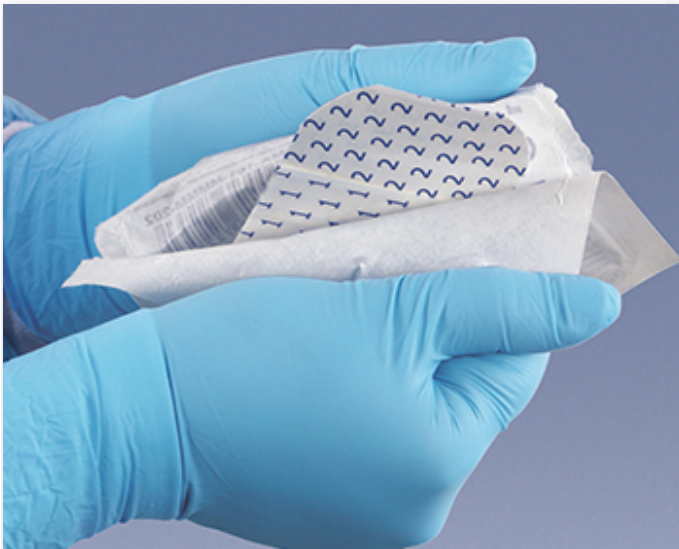

Vor dem Anlegen die Wunde reinigen und die Haut um der Wunde trocknen.

2



Das Einzelverpackung ohne Zerbrechen des Papiers öffnen und den Verband herausnehmen.

3



Das Schutzpapier markiert mit der Nummer 1 entfernen.

4



Den Verband auf die Wunde anlegen.

5




Das Schutzpapier markiert mit der Nummer 2 entfernen.

6



Den ganzen Verband ankleben auf die Haut druckend.

7

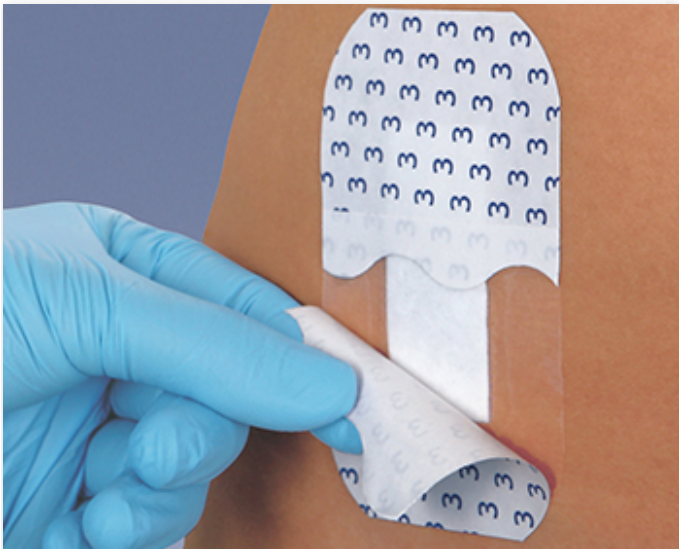


Die Schutzpapiere markierte mit der Nummer 3 entfernen ziehend nach draußen.

8



9

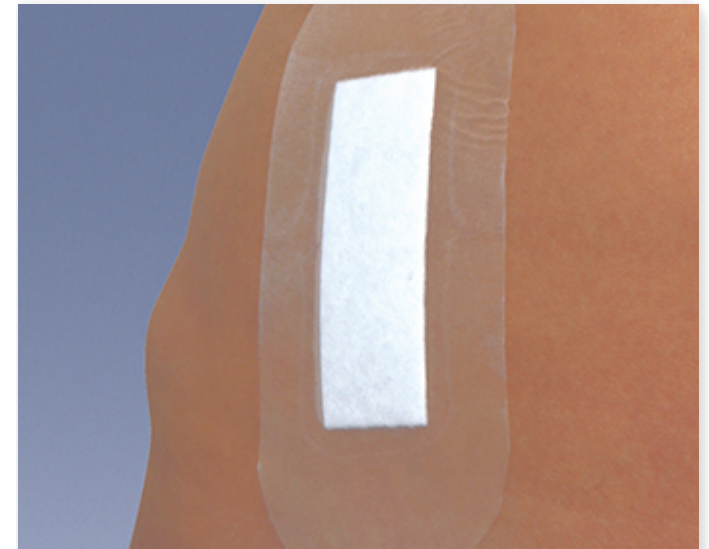

Die Oberfläche des Verbandes glätten und der Ränder an der Haut drücken.

10



Den Verband bei dem Anlegen nicht dehnen. Das Saugkissen bei dem Anlegen nicht berühren. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Exsudatmenge. Die transparente Struktur ermöglicht eine ständige Beobachtung der Haut um die Wunde.

11



Um den Verband schmerzfrei zu entnehmen, soll man eine Ecke des Verbandes abziehen und dann ziehend nach Unten die Struktur der Klebstoff zerreißen. Der Verband wird leicht und schmerzlos entfernt.