

Anlegen des Verbandes Medisorb G

Um die Wunde mit trockenem nekrotischem Gewebe zu verbinden, bereiten Sie Medisorb G und einen Deckverband z.B. Medisorb F. Wählen Sie die Größe des Deckverbandes um die ganze Wunde abzudecken.



1. Ziehen Sie Handschuhe an und reinigen Sie die Wunde mit steriler 0.9%iger Kochsalzlösung oder Ringer-Spüllösung. Tupfen Sie die umgebende Haut trocken.
2. Entfernen Sie die Verschlusskappe und wischen Sie das Applikatorröhrchen mit einem Alkoholtupfer ab.
3. Halten Sie mit dem Applikationsröhrchen Abstand zum Wundbett und drücken Sie sanft das Gel heraus.



4. Die ganze Wunde mit einem mindestens 5mm dicken Gelfilm bedecken.
5. Bedecken Sie die Wunde mit einem geeigneten Deckverband z.B. mit Medisorb F, der die visuelle Inspektion der Wunde ermöglicht.

Bei der Auswahl von Medisorb F:



6. Entfernen Sie das zentrale Schutzpapier von der klebenden Seite des Verbandes. Positionieren Sie den Verband mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde und drücken Sie ihn sanft an.
7. Entfernen Sie die seitlichen Schutzstreifen langsam mit beiden Händen und drücken Sie den Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut fest.
8. Nach Befestigung des Verbandes entfernen Sie die Trägerfolie mit den grünen Pfeilen, indem Sie sie in Pfeilrichtung abziehen.



AUFMERSAMKEIT:

9. Der Tubeninhalt ist jeweils für eine Anwendung bei einem Patienten vorgesehen.
10. Bei nekrotischen Wunden sollte Medisorb G alle 24 Stunden gewechselt werden. Bei sauberen Wunden kann der Verband bis zu 3 Tagen auf der Wunde belassen werden. Medisorb G sollte gewechselt werden, wenn Exsudat aus dem Deckverband ausläuft.



11. Zur Entfernung von aufgebrachtem Gel, spülen Sie die Wunde mit steriler 0.9%iger Kochsalzlösung oder Ringer-Spüllösung.

