

Codosil™



ADHESIVE

Codosil™ ADHESIVE

selbstklebender
Silikonverband

schmerz-
-lose
Therapie
Narben-
-behandlung



TRICOMED

**weich
selbstklebend**

keine Verschmutzung
der Kleidung

Codosil™ ADHESIVE ist ein weicher
Schichtverband zur Behandlung
von Narben und Keloiden.

Er bewährt sich sehr gut sowohl bei durchwachsenen, wenig elastischen Verbrennungsnarben (hypertrophe Narben und Keloide) als auch bei frischen Narben, die infolge von chirurgischen Eingriffen, z.B. nach einem Kaiserschnitt entstanden sind.

Codosil™ ADHESIVE stellt mit der Kompressionskleidung Codopress® ein in der Kompressionstherapie, die seit mehreren Jahren als effektive Behandlungsmethode von großen Verbrennungsnarben – insbesondere bei Kindern – bekannt ist, verwendetes Komplettsystem dar.

Der Verband glättet die Narbe, reduziert die Rötung und den Juckreiz.

Verwendung

- bei der Therapie von durchwachsenen Narben und Keloiden,
- vorbeugend bei Personen mit Tendenz zur Bildung von durchwachsenen Narben und Keloiden, um deren Auftreten zu vermeiden,
- als Teil der Kompressionstherapie in der Therapie von großen Verbrennungsnarben zusammen mit Codopress®-Kleidung.



WIE IST **Codosil™ ADHESIVE** ZU VERWENDEN

1 Das Produkt muss der Form der Narbe angepasst werden

Zu beachten ist jedoch, dass der Verband 1 cm größer als die Narbe sein muss.

2 Weiße Schutzfolie abziehen

Die weiße Schutzfolie schützt die Klebeschicht des Verbandes.

3 Den Verband auf die Narbe aufkleben

Durch Adhäsionseigenschaften des Verbandes kann er mehrmals auf die Haut aufgeklebt werden. Vor erneuter Verwendung muss der Verband gewaschen werden.

4 Fixierung des Verbandes mit dem elastischen Codofix®-Netz

Um ein ungewolltes Lösen des Verbandes an beweglichen Körperteilen zu verhindern, empfiehlt es sich, das elastische Fixierungsnetz Codofix® zu verwenden.

Das Netz ist in 8 verschiedenen Breiten erhältlich, sodass es präzise dem Umfang des entsprechenden Körperteils angepasst werden kann.



Der Verband dient zur Narbenbehandlung, er kann also erst nach der vollständigen Wundheilung verwendet werden.

Der Verband darf nicht vor Entfernen der chirurgischen Nähte verwendet werden.



ZUR PFLEGE DER WUNDE UND DES VERBANDS **Codosil™ ADHESIVE**



- **Der Fläche unter dem Verband und der Verband selbst sind zweimal täglich**

in einer milden Seifenlauge, ohne Zusatz von feuchtigkeitsspendenden Mitteln, wie Creme oder Öl zu waschen. Nach dem Waschen ist das Produkt mit klarem, warmem Wasser abzuspuhlen.

- **Nach dem Waschen den Verband ausbreiten und trocknen lassen**

Nach dem Trocknen sind die Klebeeigenschaften des Verbandes zu prüfen – sind sie ausreichend, so ist er erneut auf die Narbe aufzukleben. Der Verband kann verwendet werden, bis er mechanisch beschädigt wird oder seine Klebeeigenschaften verliert. Dieser Zeitraum variiert gewöhnlich zwischen 10 und 28 Tagen und kann kürzer sein, wenn die Narbe einer ständigen Bewegung oder Reibung ausgesetzt ist.

- **Der Verband soll bis zu 24 Stunden am Tag auf der Narbe verbleiben**

– mit Unterbrechungen für die Reinigung des Verbandes. Die Verwendungsdauer des Produktes muss dosiert werden, d.h. am Anfang soll der Verband nur für einige Stunden auf die Narbe aufgelegt werden. Eine allmähliche Verlängerung der Tragedauer gewöhnt die Narbe an den Verband und hilft, evtl. Überempfindlichkeit der Haut vermeiden. Die Dauer des allmählichen Kontaktes des Verbandes mit der Narbe ist durch den zuständigen Arzt zu bestimmen, der diese Behandlungsmethode empfohlen hat.

Beispiel der allmählichen Verwendung des Verbandes:

- die ersten zwei Tage den Verband 2 Stunden tragen,
- die nächsten zwei Tage 4 Stunden,
- in den nächsten Tagen verlängern wir die Verweildauer des Verbandes auf der Narbe um 2 Stunden täglich, bis schließlich 24 Stunden erreicht werden.

• Bei Symptomen der Überempfindlichkeit, wie:

- Ausschlag
- Juckreiz
- Mazeration der gesunden Hautoberfläche um die Narbe

ist die Verwendung des Verbandes zu unterbrechen, bis die Symptome verschwinden. Die Therapie kann dann für eine kürzere Zeit als bei der ersten Anwendung wieder aufgenommen werden. Wenn bei der ersten Verwendung nach 2 Stunden eine allergische Reaktion auf den Verband auftrat, so ist der Verband bei der nächsten Probe nur 1 Stunde lang zu verwenden. Am nächsten Tag verlängern wir die Anwendung auf 2 Stunden. Kommt es wiederholt zu Problemen, so ist die Verwendung des Verbandes zu unterbrechen und der Arzt zu kontaktieren.

Treten die Überempfindlichkeitserscheinungen erst nach einer längeren Verwendung des Verbandes auf, so ist sicherzustellen, ob nicht Reinigungsmittel oder der Verlauf der Hygienemaßnahmen geändert wurden. Die Anwendungszeit des Verbandes kann auch auf 12 Stunden pro Tag reduziert werden. Verschwinden die Überempfindlichkeitssymptome nicht, so ist die Verwendung des Verbandes zu unterbrechen und der Arzt zu kontaktieren.

• Gesamtzeit der Behandlung

ist für jeden Patienten individuell. Sie hängt von mehreren Faktoren ab, die u.a. mit der Narbe zusammenhängen (Art, Alter, Stelle der Narbe) und therapiebedingt sind, wie systematische Verwendung und die tägliche Anwendungsdauer des Verbandes. Zufriedenstellende Effekte sind gewöhnlich nach ca. 2-4 Monaten einer systematischen Therapie zu beobachten..

Der Verband soll nicht zusammen mit Salben verwendet werden, da diese seine Struktur beschädigen und zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen können.

WARUM LOHNT SICH DIE VERWENDUNG VON **Codosil™ ADHESIVE**



Verbesserung des Aussehens der Narbe

Bereits nach einigen Tagen wird die Narbe:

- heller
- flacher
- elastischer
- weniger sichtbar

Schmerzlose Behandlung

- ohne Skalpell, Laser oder Betäubung
- kein mechanischer oder chemischer Eingriff in die Narbe
- keine Schmerzen bei der Verwendung
- minimiert das Risiko von Komplikationen

Zuschnitt des Verbandes und Anpassung an die Narbengröße

- erhöht den Komfort des Patienten
- reduziert die Behandlungskosten – der abgeschnittene, nicht verwendete Teil des Verbandes kann im weiteren Verlauf der Behandlung eingesetzt werden

Selbstklebend

- kein Sekundärverband notwendig
- um den Tragekomfort an beweglichen Stellen zu verbessern, empfiehlt sich die Fixierung des Verbandes mit dem Codofix®-Gitter

Mehrmals verwendbar

- tägliches Waschen des Verbandes erneuert seine Gebrauchseigenschaften. Der Verband kann verwendet werden, bis seine selbstklebende Eigenschaft verloren geht oder bis zu seiner mechanischen Beschädigung.

Zusätzliche Schicht

- Außenschutzschicht – bei einer Langzeittherapie erhöht sich die Lebensdauer des Verbandes und trägt somit zur Kostensenkung bei.

Codosil™

ADHESIVE



Tricomed SA – über 50 Jahre Tradition

Tricomed SA ist ein polnisches Unternehmen mit über fünfzigjähriger Tradition bei der Entwicklung und Produktion medizinischer Produkte. Heute sind wir im Rahmen der Kapitalgruppe TZMO SA tätig.

Zum reichhaltigen Produktsortiment gehören insbesondere Implantate, Verbandmaterial zur speziellen Wundversorgung und Kompressionsprodukte zur Narbenbehandlung.

2009 erhielt TRICOMED SA den Status eines Forschungs- und Entwicklungszentrums. Sämtliche Produkte der Firma verfügen über das CE-Zeichen und werden gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 13485 produziert.



14 cm x 14 cm



14 cm x 7 cm



7 cm x 7 cm



TRICOMED SA

ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Polska
www.tricomed.com

TZMO SA

www.tzmo-global.com
www.de.matopat-global.com