

Codopress®



Codopress®-Kompressionsprodukte
zur Behandlung von Verbrennungs-
und Operationsnarben

maßge-
schneidert
individuell
für jeden
Patienten



TRICOMED

Die Pressotherapie ist eine Behandlungsmethode für Verbrennungs- und Operationsnarben, bei der Kompressionsprodukte verwendet werden.

Um möglichst gute therapeutische Effekte zu erzielen, müssen die Produkte jedem Patient individuell angepasst (maßgeschneidert) werden. In dieser Behandlungsmethode der Narben spielt der Zeitpunkt des Beginns der Kompressionstherapie eine wichtige Rolle, deswegen sollte die Entscheidung über die Therapieaufnahme direkt nach der Wundheilung getroffen werden. Die Rehabilitationsdauer beträgt normalerweise 2 Jahre und das Kompressionsprodukt ist 23 Stunden am Tag, mit Unterbrechungen für Bad und Massage zu tragen.

Um den Komfort für den Patienten und die Effizienz der Therapie zu erhöhen, empfiehlt sich eine Verbindung der Kompressionsprodukte von Codopress® mit den Silikonverbänden Codosil™ ADHESIVE.

Der unter dem Kompressionsprodukt direkt auf die Narbe aufgeklebte Silikonverband wirkt glättend und erweicht die Narben, wodurch der Rehabilitationsprozess gefördert wird.



Silikonverband
Codosil™ ADHESIVE



KONSTRUKTION DER **Codopress®**-KOMPRESSIONSPRODUKTE



Die **Codopress®**-Kompressionsprodukte bestehen aus hochelastischem, atmungsaktivem, gestricktem Stoff.

Die Elemente der Strickware sind nähtechnisch mit **Flachnähten** verbunden, wodurch eine zusätzliche Reizung ausgeschlossen ist.

Sämtliche bei der Herstellung der **Codopress®**-Produkte eingesetzten Materialien verfügen über das Zertifikat **OEKO-TEX-Standard 100**.

Dieser Standard bestätigt ihre **hohe Qualität** und gewährleistet **Einsatzsicherheit**.



HOHE
Qualität
Einsatzsicherheit



VERWENDUNG DER **Codopress®**-PRODUKTE

Die Kompressionsprodukte sind ununterbrochen zu tragen:

- **mindestens 6-24 Monate, 23 Stunden am Tag** mit Pausen für Hygienetätigkeiten,
- **nur bei Kindern bis zum 18. Lebensmonat** empfiehlt es sich, das Produkt für 3-4 Stunden mit 1-2 Stunden Pause anzuziehen.


Der Organismus muss allmählich an das Produkt gewöhnt werden:

- **beginnend z.B. mit 30 Minuten.** Anfänglich kann an Extremitäten oder nicht komprimierten Körperteilen eine Schwellung auftreten – diese lässt jedoch nach einigen Tagen nach.

Auftreten deutlicher Heilungssymptome:

- wie z.B.: Glättung, Verblassen, Weichwerden der Narbe kann signalisieren, dass man die Verwendung der Kompressionsprodukte beenden kann.

In jedem Fall trifft der Arzt die Entscheidung über den Behandlungsabschluss.

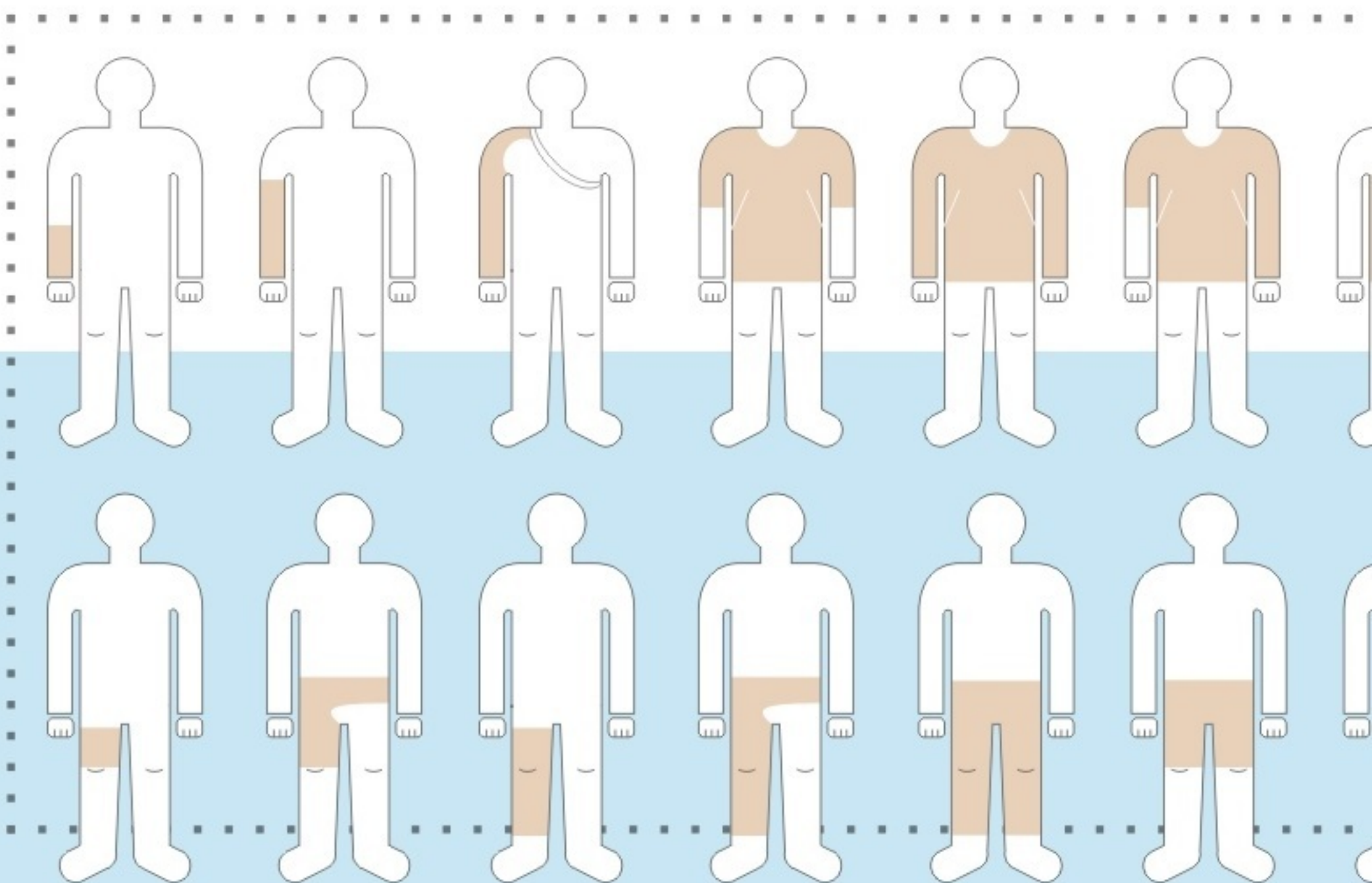

Sämtliche bei der
Herstellung der Produkte
eingesetzten Stoffe
verfügen über:


das Zertifikat OEKO-TEX
Standard 100

Im gesamten Behandlungsverlauf müssen die Produkte
normalerweise mehrmals gekauft werden – je nach
Verbrauch und Maßänderung des Patienten (trifft
insbesondere bei Kindern zu).

**Die Codopress®-Produkte sind
maßgeschneidert genäht und individuellen
Patientenbedürfnissen angepasst.**

- Alle bei der Verbrennungsbehandlung eingesetzten Produkte
werden auf Anfrage und nach Vermessen des Patienten genäht.
**Die Patienten, die an Codopress® verwiesen worden,
sollen** geheilte Wunden haben, ohne Verbandstoffe, sodass
Maß genommen und das Produkt anprobiert werden kann.

Produktsortiment **Codopress®**

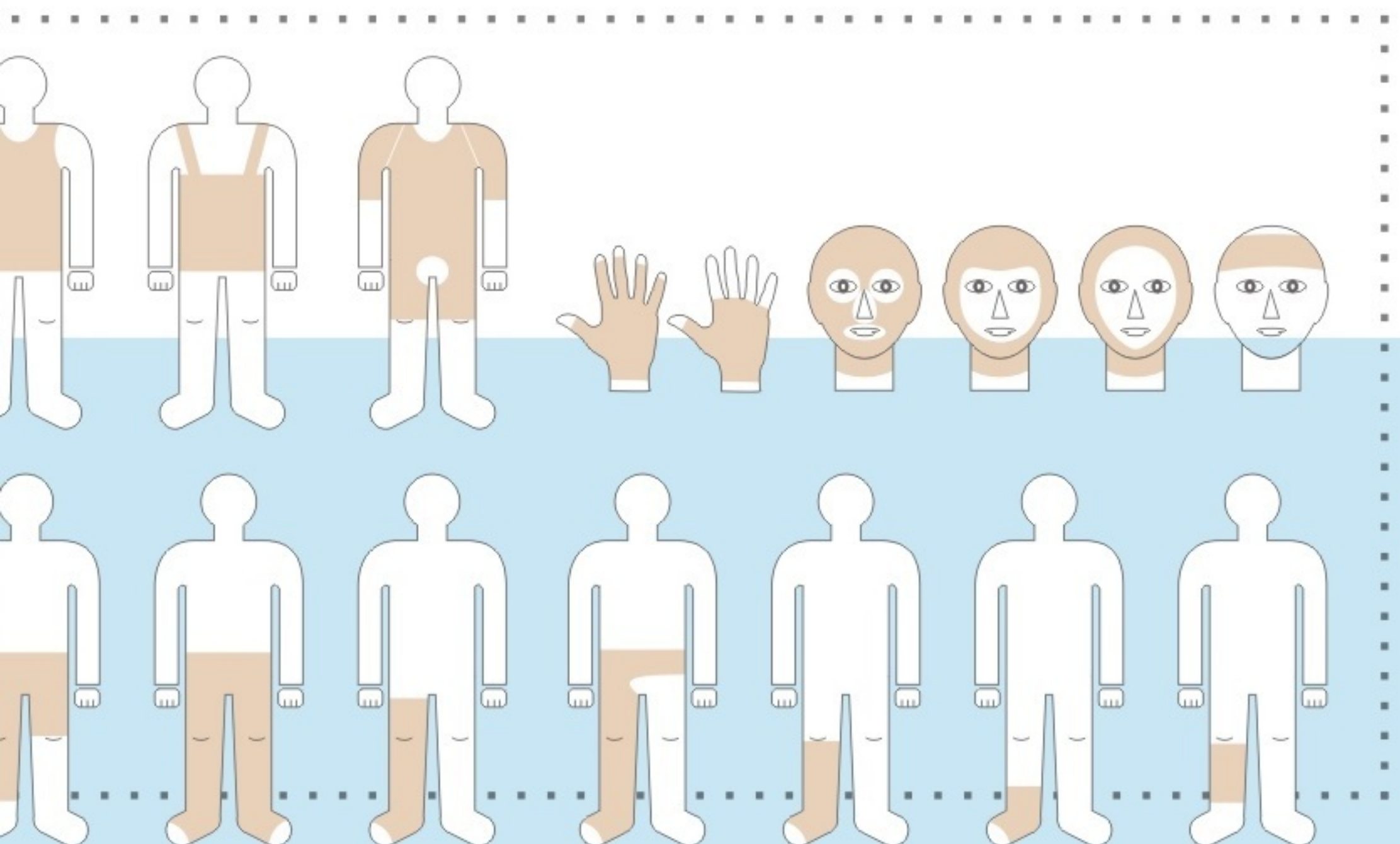



WIE ERHALTE ICH DAS PRODUKT **Codopress®**

Um das Codopress®-Kompressionsprodukt zu erhalten, kontaktieren Sie:

Empty dashed box for contact information.

Sämtliche
Produkte werden **auf
individuelle Bestellung
des Patienten** genäht, nachdem
die Maße genommen wurden.

**Die Wunden des Patienten
müssen bereits geheilt
und ohne Verbände
sein.**

Mehr Infos unter:
www.tricomed.com



PRODUKTMERKMALE

Codopress®

Die **Codopress®**-Produkte zeichnen sich durch einen hohen Kompressionsgrad aus, welcher die besten Effekte bei der Behandlung von Verbrennungs- und Operationsnarben gewährleistet.

- können in Verbindung mit anderen Behandlungsmethoden eingesetzt werden
- rufen keine Allergien und Hautreizungen hervor
- reduzieren den Juckreiz
- verhindern Gelenkkontrakturen

Zeit
ist der wichtigste
Faktor bei der
Narben-behandlung
deshalb:
**keine Zeit
verlieren...**



Codopress®



Tricomed SA – über 50 Jahre Tradition

TRICOMED SA ist ein polnisches Unternehmen mit über fünfzigjähriger Tradition bei der Entwicklung und Produktion medizinischer Produkte.

Es handelt sich dabei hauptsächlich um Biomaterial (Implantatmaterial) und Verbandmaterialien zur speziellen Wundversorgung. Einen integralen Bestandteil des Firmenangebotes stellen die Kompressionsprodukte zur Behandlung von Verbrennungs- und Operationsnarben, sowie Silikonverbände dar.

2009 erhielt TRICOMED SA den Status eines Forschungs- und Entwicklungscenters. Das eröffnet uns die Aussicht auf weitere Erfolge, bei denen weiterhin das Wohl des Patienten im Vordergrund steht.

Alle in der Firma hergestellten Produkte entsprechen den geltenden Anforderungen der EU. Das Unternehmen hat das implementierte Qualitätsmanagementsystem ISO 13485.

11-MAN-27UL-008/DE/02.2014

TRICOMED SA

ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Polen
www.tricomed.com

 **TZMO SA**

www.tzmo-global.com
www.de.matopat-global.com